

**Daha Yoğun, Daha Saf,
Daha Etkili PRP için Tasarlandı**

Yüksek Platelet Verimi Stabil ve Homojen Jel Teknolojisi

Density Platelet Gel PRP Tüpü, platelet açısından zengin plazmanın güvenli şekilde ayrıştırılması için özel olarak formüle edilmiş ayırıcı jel ve antikoagülan içerir.

Ürün; **saç, cilt ve ortopedi** alanlarında kullanılan PRP prosedürlerinde tercih edilen, yüksek kalite standartlarına sahip güvenilir bir tıbbi cihazdır. Steril, tek kullanımlık medikal cihaz.



İLAÇ DEĞİLDİR.

www.renatus.com.tr

Tendon ve Baę Dokuları İin Yoęun Platelet Desteęi

Plazmanın En Gl Hali Ulařmanın En Gvenilir Yolu



1. Saę Tedavilerinde PRP

- Saę dklmesi
- Zayıf kklerin glendirilmesi
- Saę yoęunluęunun desteklenmesi

PRP, saę derisine mikro enjeksiyon teknięi ile uygulanır. Canlı kkleri desteklemeye yardımcı olur.

2. Cilt Tedavilerinde PRP

- İnce izgiler
- Cilt matlıęı
- Leke grnm
- Cilt elastikiyet kaybı

Platelet aęısından zengin plazma, cilt yenilenmesini desteklemeye yardımcı olur; daha canlı ve taze bir grnm hedeflenir.

3. Ortopedik Uygulamalarda PRP

- Tendon ve baę yaralanmaları
- Diz ii uygulamalar
- Kronik aęrı blgeleri

PRP'nin ierięindeki byme faktrleri, doku iyileřmesini destekleyen bir ortam oluřturur.



Zayıflayan Saç Köklerine Bilimsel Dokunuş

Saç Dökülmesine Karşı Klinik Destek

Güçlü Platelet Formülü ile Kökleri Uyandırın



Tedavi Etkinliğini Artırmaya Yardımcı Modern PRP Sistemi

Ayırıcı Jel (Separating Gel)

Santrifüj sırasında kan bileşenlerini katmanlara ayırmaya yardımcı olur.

Jel, kırmızı kan hücreleri ile platelet açısından zengin plazma arasında fiziksel bir bariyer oluşturur.

Homojen ve stabil bir PRP elde edilmesini sağlar.

Kan ile reaksiyona girmez; inert ve tıbbi kullanıma uygun bir jeldir.



Antikoagülan (Pıhtılaşma Önleyici Madde)

Kanın tüp içinde pıhtılaşmasını geciktirir ve ayrıştırmada stabilite sağlar.

Böylece trombositlerin ayrışması kolaylaşır.

KUTU İÇERİĞİ

1 adet jel ayırıcı ve antikoagülan içeren PRP tüpü
1 adet sadece antikoagülan içeren ikinci tüp
Ürün steril, tek kullanımlık ve tıbbi cihaz sınıfındadır.

Yüksek platelet miktarını koruyacak şekilde tasarlanmış tüp iç yüzeyi.

UYGULAMA BİÇİMİ

1. Kan Alımı

Hastadan steril koşullarda belirli miktarda kan alınarak tüpe aktarılır.

2. Santrifüj İşlemi

Tüp, santrifüje yerleştirilir. Yaklaşık 5–8 dakika içinde kan bileşenleri ayrıştırılır.

3. PRP'nin Ayrıştırılması

Ayırıcı jel sayesinde trombosit zengin plazma net şekilde ayrılmış olur.

4. Uygulama

Elde edilen PRP istenen bölgeye çok ince uçlu iğnelerle mikroenjeksiyon yöntemiyle uygulanır.

KULLANIM TALİMATI

- Tüp tek kullanımlıktır; tekrar kullanılmaz.
- Kan alımı sırasında tüp yavaşça eğilerek karıştırılmalıdır.
- Santrifüj, üretici talimatlarına uygun hız ve sürelerde çalıştırılmalıdır.
- Santrifüj sonrası plazma tabakası dikkatlice toplanmalıdır.
- Direkt güneş ışığı görmeyen, serin bir yerde saklanmalıdır.

NEDEN

DENSITY PLATELET GEL?



Yüksek Platelet Verimi

Separasyon jeli sayesinde kırmızı kan hücreleri ve plazma net şekilde ayrılır. Böylece PRP daha yoğun ve uygulanabilir hale gelir.



Homojen ve Stabil Jel Teknolojisi

Kan bileşenleri santrifüj sırasında karışmaz, ürün standart kalite sağlar.



Hızlı ve Pratik Çalışma İmkânı

Klinikler, her uygulamada aynı prosedürü takip ederek güvenilir sonuç alır.




Tıbbi Kalite ve Güven

EN ISO 13485 tıbbi cihaz üretim standardına sahip olan ürün, hijyen ve kalite açısından uluslararası kriterlere uygundur.



Çok Yönlü Kullanım

Saç, cilt, ortopedi ve estetik uygulamalar için tek tüple profesyonel çalışma fırsatı sunar.

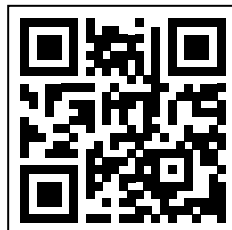

Renatus



+90 555 145 38 08
+90 216 375 38 08